



méterre vágható
tapasz

2db
5 × 15 cm



drog- és doppingmentes



tapasz színe: bőrszínű

Mikroelektromos működésű fájdalomcsillapító, izomgörcsoldó tapasz. Nedveség (veríték) hatására gyenge egyenáramot létesít a bőrön, mely áram az izmot ellazítja, a görcsöt megszünteti. A fájdalmat gyorsan enyhíti, illetve elmulasztja.

A Fájdalomcsillapító tapasz az **akut izom- és ízületi fájdalmak** kezelésére szolgál, így jó hatása van **fejfájás, fogfájás, sportsérülések** stb. esetén.

Figyelmeztetések: *Külső használatra!* Egyszer használatos! Nyílt sebre nem alkalmazható! Használat előtt olvassa el a belső oldalon található tájékoztatót! A ragasztóanyag tartalmaz **kaucsukot (LATEX)**, amely az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki, mely a bőr pirolásával, viszketéssel jár: ez esetben távolítsuk el a tapaszt és ne használjuk! Várandós, szoptató anyák és gyermekek esetében nem áll rendelkezésre elegendő információ.

Tárolás: legfeljebb 30 °C-on, száraz, hűvös helyen. Felnyitás után 6 hónapig használható fel.

Forgalmazók: gyógyszertárak, bioboltok

Gyártja:
MOTTO-ELEKTRO KFT.
H-1025 Budapest
Törökvész út 74/B
e-mail: motto@motto.hu
web: www.motto.hu

Orvostechnikai eszköz I. kockázati osztály



LOT: Felhasználható: ev.honap.nap

MOTTO®

1982 óta a piacon.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ

Az egy csomagban található tapaszokból 6db 5 × 5 cm-es vagy 10db 3 × 5 cm-es darab vágható fel, így folyamatos használat esetén 1-2 hónapra elegendő.

Alkalmazás módja:

- A tapaszról ollóval vágjunk le egy 3-5 cm hosszú darabot, távolítsuk el róla a védőpapírt, és a **fájdalom helyére**, tiszta, száraz, krémtől, szőrtől mentes, ép bőrre ragasszuk fel! Kerüljük a vékony, sérülékeny bőrön való alkalmazást! Nagyobb fájó izom esetén tapintsuk ki a legfájdalmasabb pontot és oda ragasszunk (nem szükséges a teljes fájó területet lefedni a tapasszal)!
 - Rászorított **kezünkkel melegítsük fel** pár másodpercig a felragasztott tapaszt, hogy jól felragadjon és a működés hamar beinduljon.
 - Egyidejűleg **több helyen is viselhető**, többféle fájdalom egyidejű kezelésére is alkalmas, de egyszerre legfeljebb egy csomag tartalma (2 db 5 × 15 cm-es tapasz) használható.
 - Mindig a tapinthatóan legerősebb fájdalom helyére tapasszunk.
 - **1-10 napig** használjuk a tapaszt! Összesen legfeljebb 30 napos folyamatos használata javasolt, ezt követően 1 hetes szünet beiktatása szükséges.
 - A tapasz **vizálló**, lehet vele tisztálkodni, de erős dörzsölését kerüljük.
 - A tapasz eltávolítása után a maradék ragasztóanyagot alkohollal távolíthatjuk el a bőrről.
- A MOTTO TAPASZNAK GYULLADÁSCSÖKKENTŐ HATÁSA IS VAN!**

Teljesítőképesség: Állapottól függően pár órától néhány napon belül várható a fájdalom enyhülése. Az alkalmazás nem helyettesíti a szakorvosi diagnózist és kezelést.

Egészségügyi szakemberrel szükséges konzultálni a következő esetben: Allergiás reakció (bőrpír, viszketés) esetén. Vagy bármely más mellékhatás bejelentése: E-mail: motto@motto.hu; Tel.: +36 1 2750106




A 41. *Bruxelles-i Szabadalmi Világkiállítás*
valamint a *nürnbergi Nemzetközi Találmányi*
Kiállítás kitüntetett találmánya.



IFU&LB/K/HU/V01-2021.03.30

10 napig
működőképes

MOTTO®

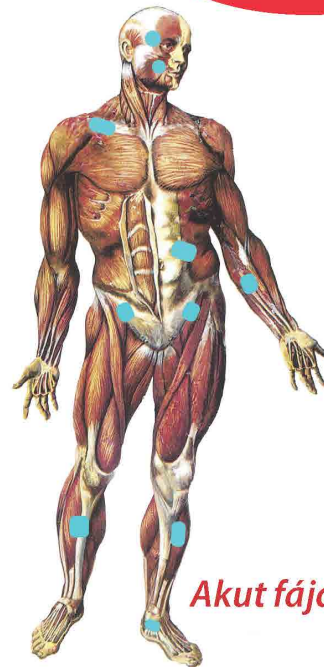

Akut fájdalmakra


- » fejfájás
- » fogfájás
- » sportsérülések

Gyógyszermentes tapasz

díjazott
MAGYAR
TALÁLMÁNY

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
TAPASZ



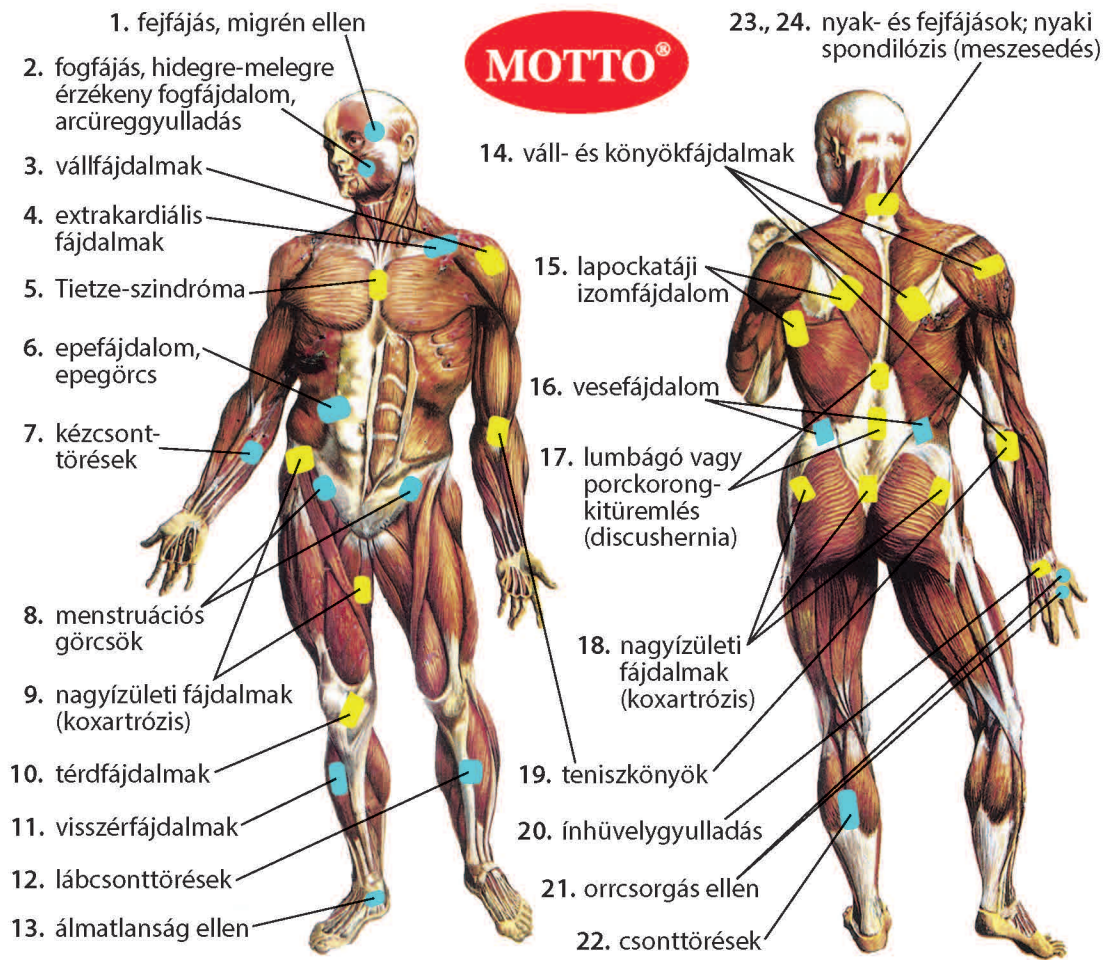

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ (kék jelű)

- **Fejfájás, migrén** esetén (1) a halántékokra Ø 3 cm-es tapaszokat ragasszunk. Érdemes már enyhébb fájdalom érzékelése esetén megkezdeni a kezelést, amellyel akár el is kerülhető a fejfájás felerősödése.
- **Fogfájásnál**, (2) hőérzékeny fognál, fogkezelés után, íny- vagy arcüreggyulladásnál az arcra kívül Ø 2-3 cm-es tapasz ragasztandó, ami 20-40 perc alatt elviselhetővé csökkenti a fájdalmat. Természetesen a fogorvost mielőbb fel kell keresni!
- **Szűzár** esetén 2-3 cm-es tapaszt az állkapocsszögleti ízületére, ill. a fájdalom helyére ragasszunk.
- **Extrakardiális (szívtáji) fájdalomnál** (4) a kulcsfont felett baloldalon egy 3×5 cm-es darabot a karotisérre (nyaki ütőér) ragasszunk!
- **Epe- (6) vagy vesetáji (16) fájdalomnál** 5×5 cm-es tapaszt alkalmazunk!
- **Csonttörés** esetén (7, 12, 22) a fájdalom helyére, ill. a törés fölé és alá, (a gipsz levétele után) több, 4×5 cm-es csík ragasztandó, ami az izommozgás megindulását és a csont összeforrását segíti.
- **Menstruációs fájdalomnál** (8) a fájdalom helyére 1-1 db 3×5 cm-es tapasz ragasztandó.
- **Alvás, sportolás közben fellépő izomgörcs** várható helyére 5×5 cm-es tapaszt alkalmazunk.
- **Visszértáji fájdalomnál** (11) kb. 40 percen belül hatásos, de csak a fájdalmat szünteti meg, a visszértáji bántalmakat nem gyógyítja.
- **Alvás elősegítésére** (13), a belső bokacsont alá 3×5 cm-es tapasz ragasztandó mindkét lábon.
- **Orrcsorgás** (21) ellen a hüvelykujj és a mutatóujj nagy ízületére mindkét kézen Ø 2 cm (összesen 4) tapasz szükséges.

REUMATAPASZ (sárga jelű)

- **Kar- és vállfájdalmaknál** (3, 14) a fájdalom helyére 5×5 cm-es, a gerincoszlop és a lapocka közé 3×5 cm-es tapaszt ragasszunk fel! Ajánlatos a tapaszt a fájdalom megszűnte után még néhány napig viselni.
- **Idült térd-, csípőfájdalmak** (9, 10, 18) esetén néha előfordul, hogy a tapaszt folyamatosan viselni kell. Általában 1-10 nap alatt a fájdalom megszűnik, ha az oka izomgörcs vagy reuma.
- **Lumbágó** vagy más gerincfájdalomnál, **porckorongsérvnél** (17) 5×5 cm-es tapaszt kell ragasztani a fájdalom helyére.
- **Csípőízületi fájdalomnál** (18) 5×5 cm-es darabokat helyezünk a keresztcsontra, a kitapintható forgóra és a comb belső felső részére (9) (adduktor izom).
- **Ínhüvelygyulladás** (20) esetén a fájdalom helyére tapasszunk.
- **Hátulról sugárzó fejfájás, nyaki meszesedés** esetén (23, 24) a nyakcsigolyákra, illetve a fájdalom helyére ragasszunk egy 3×5 cm-es darabot.
- **Ütés, zúzódás** **fájdalmi** a tapasszal csökkenthetők és a vérálfutás felszívódását is gyorsítja.