



méretre vágható
tapasz

2db
5 x 15 cm



tapasz színe: bőrszínű

MOTTO REUMATAPASZ

Gyógyszermentes fájdalomcsillapító tapasz.
A tapasz felületére felvitt ásványi anyag és a nedvesség (veríték) hatására olyan reakciót vált ki, amely kismértékű feszültségváltozást generál. Ez hatással van a bőr alatti szövetekre, elősegíti az izmok ellazulását és a fájdalom enyhítését.

Krónikus ízületi, izom- és a gerincfájdalmak kiegészítő kezelésére ajánlott.

Figyelmeztetések: Külső használatra! Egyszer használatos! Nyílt sebre nem alkalmazható! Nem steril. Használat előtt olvassa el a belső oldalon található tájékoztatót! A ragasztóanyag tartalmaz **kaucsukot (LATEX)**, amely az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Gyermekek, várandós, szoptató anyák esetében nem áll rendelkezésre elegendő információ.

Tárolás: Legfeljebb 30°C-on, száraz, hűvös helyen. A tasakcsomagolás felnyitása után 6 hónapig használható fel.

Összetétel: Kaucsuk ragasztóanyaggal ellátott tapasz, felületén réz tartalmú ásványi anyag granulátummal.

Vény nélkül kapható
orvostechnikai eszköz (I.)

Gyártja:
MOTTO-ELEKTRO KFT.
1025 Budapest
Törökvész út 74/B
e-mail: motto@motto.hu
web: motto.hu



LOT

Felhasználható: ev.honnap.nap



1982 óta a piacon.

REUMATAPASZ

Alkalmazás módja: A tapaszból ollóval vágjunk le egy 3-5 cm hosszú darabot, távolítsuk el róla a védőpapírt, és a fájdalom helyére, tiszta, száraz, krémtől, szőrtől mentes, ép bőrre ragasszuk fel! Kerüljük a vékony, sérülékeny bőrön való alkalmazást! Nagyobb fájó izom esetén tapintsuk ki a legfájdalmasabb pontot és oda ragasszunk (nem szükséges a teljes fájó területet lefedni a tapasszal)!

Teljesítőképesség: Állapottól függően, pár órától néhány napon belül várható a fájdalom enyhülése.

Tájékoztató az eszköz újrafelhasználásának kockázatáról: Hatástalanság és keresztfertőzés veszélye miatt nem ajánlott.


Tájékoztatás az eszköz klinikai előnyeinél hiányáról, használatával járó kockázatokról: Amennyiben nem tapasztalja a kívánt hatást, forduljon kezelőorvosához! Az alkalmazás nem helyettesíti a szakorvosi diagnózist és kezelést.

Fennmaradó kockázatok, ellenjavallatok, nemkívánatos mellékhatások: A címkén feltüntetett, a ragasztóanyagra kialakuló allergiás reakción kívül nincs egyéb, ismert mellékhatása, illetve kockázata az eszköz használatának. Ne használja az eszközt egyidejűleg más, helyi alkalmazású készítménnyel!

Mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) vagy más mágneses mechanizmuson alapuló vizsgálat, terápia előtt a tapaszt el kell távolítani! A vizsgálat után helyezzen fel egy új tapaszt!

Pacemaker-t használó beteg esetében: elvi működése alapján nem befolyásolhatja a pacemakert, de nem áll rendelkezésre elegendő információ.

Egészségügyi szakemberrel szükséges konzultálni a következő esetben: Allergiás reakció (bőrpír, viszketés) esetén, vagy bármely más mellékhatás bejelentése:
E-mail: motto@motto.hu;
Tel.: +36 1 2750106

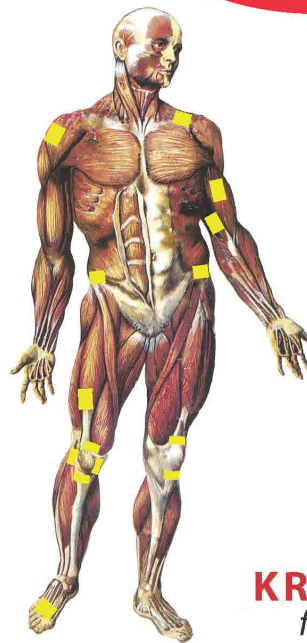

REUMATAPASZ

KRÓNIKUS
fájdalmakra

- **ízületi bántalmak**
- **izomfájdalmak**
- **gerincfájdalom**

Gyógyszermentes, doppingmentes



díjazott
MAGYAR
TALÁLMÁNY

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

■ AJÁNLOTT RAGASZTÁSI PONTOK ■

1 A csomagban található tapaszok kisebb darabokra vághatóak. Ollóval vágjon le egy 3-5 cm hosszú darabot, majd távolítsa el róla a védőpapírt!



A légáteresztő alapanyagú tapaszszal **7 napos folyamatos használat** lehetséges, ha a fájdalom nem szűnik, csak enyhül, cseréljük!



Vízálló, lehet vele tisztálkodni, vizes sportokhoz használni, de erős dörzsölését kerüljük.

2 A **fájdalom helyére**, tiszta, száraz, krémtől, szőrtől mentes bőrre ragassza fel a levágott tapaszt. Nagyobb fájó izom esetén tapintsuk ki a legfájdalmasabb pontot és oda ragasszon (nem szükséges a teljes fájó területet lefedni a tapasszal)!

DÓZIS: Egyidejűleg **több helyen is viselhető**, többféle fájdalom egyidejű kezelésére is alkalmas, de egyszerre legfeljebb egy csomag tartalma (2 db 5x15 cm-es tapasz) használható. 7 naponta cserélendő. Összesen 30 napos folyamatos használat lehetséges, utána 1 hetes szünet beiktatása szükséges.

3 Rászorított **kezével melegítse fel** pár másodpercig a felragasztott tapaszt, hogy jól felragadjon és a működés hamar beinduljon.



Mindig a tapinthatóan legerősebb fájdalom helyére tapasszunk!

A tapasz eltávolítása után a maradék ragasztóanyagot alkohollal vagy acetonnal távolíthatjuk el a bőrről.

Motto tapasz terméktípusok:

- **Motto reumatapasz:** krónikus fájdalmakra ajánlott. Lassú hatás elérésére lett kifejlesztve, hosszabb távú kezelési célra.
- **Motto fájdalomcsillapító tapasz, Motto fájdalomcsillapító tapasz sportolóknak:** Gyors hatás elérésére lettek kifejlesztve, rövid és/vagy hosszú távú kezelési céllal.



Díjnyertes magyar találmány:
A 41. Bruxelles-i Szabadalmi Világkiállítás (EUREKA) aranyéremmel, valamint a nürnbergi Nemzetközi Találmányi Kiállítás (iENA) bronzéremmel kitüntetett találmánya.

