



méretre vágható,
könnyen eltéphető

2db
5 x 15 cm



tapasz színe: zöld

Gyógyszermentes fájdalomcsillapító tapasz. A tapasz felületére felvitt ásványi anyag és a nedvesség (veríték) hatására olyan reakciót vált ki, amely kismértékű feszültségváltozást generál. Ez hatással van a bőr alatti szövetekre, elősegíti az izmok ellazulását és a fájdalom enyhítését.

Akut ízületi, izom- és gerincfájdalmak (váll-, könyök-, térd- és hátfájdalmak, sportsérülések) kiegészítő kezelésére ajánlott.

Figyelmeztetések: Külső használatra! Egyszer használatos! Nyílt sebre nem alkalmazható! Nem steril. Használat előtt olvassa el a belső oldalon található tájékoztatót! A ragasztóanyag tartalmaz **kaucsukot (LATEX)**, amely az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Gyermekek, várandós, szoptató anyák esetében nem áll rendelkezésre elegendő információ.

Tárolás: Legfeljebb 30°C-on, száraz, hűvös helyen. A tasakcsomagolás felnyitása után 6 hónapig használható fel.

Összetétel: Kaucsuk ragasztóanyaggal ellátott tapasz, felületén réz tartalmú ásványi anyag granulátummal.

Vény nélkül kapható
orvostechnikai eszköz (I.)

Gyártja:
MOTTO-ELEKTRO KFT.
1025 Budapest
Törökvész út 74/B
e-mail: motto@motto.hu
web: motto.hu



LOT

Felhasználható: ev.honnap.nap.



FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ sportolóknak

Alkalmazás módja: A tapaszból ollóval vágjunk le vagy kézzel tépjünk le egy 3-5 cm hosszú darabot, távolítsuk el róla a védőpapírt, és a fájdalom helyére, tiszta, száraz, krémtől, szőrtől mentes, ép bőrre ragasszuk fel! Kerüljük a vékony, sérülékeny bőrön való alkalmazást! Nagyobb fájó izom esetén tapintsuk ki a legfájdalmasabb pontot és oda ragasszunk (nem szükséges a teljes fájó területet lefedni a tapasszal)!

Teljesítőképesség: Állapottól függően, pár órától néhány napon belül várható a fájdalom enyhülése.

Fennmaradó kockázatok, ellenjavallatok, nemkívánatos mellékhatások: A címkén feltüntetett, a ragasztóanyagra kialakuló allergiás reakción kívül nincs egyéb, ismert mellékhatása, illetve kockázata az eszköz használatának. Ne használja az eszközt egyidejűleg más, helyi alkalmazású készítménnyel!

Mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) vagy más mágneses mechanizmuson alapuló vizsgálat, terápia előtt a tapaszt el kell távolítani! A vizsgálat után helyezzen fel egy új tapaszt.

Pacemaker-t használó beteg esetében: elvi működése alapján nem befolyásolhatja a pacemakert, de nem áll rendelkezésre elegendő információ.

Tájékoztató az eszköz újrafelhasználásának kockázatáról: Hatástalanság és keresztfertőzés veszélye miatt nem ajánlott.

Tájékoztató az eszköz klinikai előnyeinek hiányáról, használatával járó kockázatokról: Amennyiben nem tapasztalja a kívánt hatást, forduljon kezelőorvosához! Az alkalmazás nem helyettesíti a szakorvosi diagnózist és kezelést.

Egészségügyi szakemberrel szükséges konzultálni a következő esetben: Allergiás reakció (bőrpír, viszketés) esetén, vagy bármely más mellékhatás bejelentése: E-mail: motto@motto.hu; Tel.: +36 1 2750106



FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ sportolóknak



**GYÓGYSZER- ÉS
DOPPINGMENTES**

**7
nap**




**MAGYAR
TALÁLMÁNY**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1 A csomagban található tapaszokból ollóval vágjon le, vagy kézzel tépjen le egy 3-5 cm hosszú darabot, majd távolítsa el róla a védőpapírt!

2 A **fájdalom helyére**, tiszta, száraz, krémtől, szőrtől mentes bőrre ragassa fel a levágott tapaszt. Nagyobb fájtó izom esetén tapintsuk ki a legfájdalmasabb pontot és oda ragasszon (nem szükséges a teljes fájtó területet lefedni a tapasszal)!

3 Rászorított **kezével melegítse fel** pár másodpercig a felragasztott tapaszt, hogy jól felragadjon és a működés hamar beinduljon.

 A tapasz eltávolítása után a maradék ragasztóanyagot alkohollal vagy acetonnal távolíthatjuk el a bőrről.

DÓZIS:

Egyidejűleg **több helyen is viselhető**, többféle fájdalom egyidejű kezelésére is alkalmas, de egyszerre legfeljebb egy csomag tartalma (2 db 5 x 15 cm-es tapasz) használható. 7 naponta cserélendő. Összesen 30 napos folyamatos használat lehetséges, utána 1 hetes szünet beiktatása szükséges.



A légáteresztő alapanyagú tapasszal **7 napos folyamatos használat** lehetséges, ha a fájdalom nem szűnik, csak enyhül, cseréljük!



A tapasz **vízálló**, lehet vele tisztálkodni, vizes sportokhoz használni, de erős dörzsölését kerüljük.



Mindig a tapinthatóan legerősebb fájdalom helyére tapasszunk!

KAR ÉS VÁLL IZMAI

A fájdalom helyére 5 x 5 cm-es tapaszt ragasszunk fel! A gerincen található idegkilépő helyekre (lapockák közé és az utolsó csigolyára) is ajánlott felhelyezni, ha az egész kar fáj.

HÁT- ÉS GERINCFAJDALOM

5 x 5 cm-es tapaszt kell ragasztani a fájdalom helyére.



TÉRDFÁJDALOM

A térdkalács köré (az ízületre) ragasszunk 2 x 5 cm-es darabokat a tapaszból.

ALSÓ VÉGTAG IZMAI

KÖNYÖKÍZÜLETEK

Ragasszunk egy-egy 3 x 5 cm-es tapaszt a könyök két oldalára (belső és külső könyökdundor).

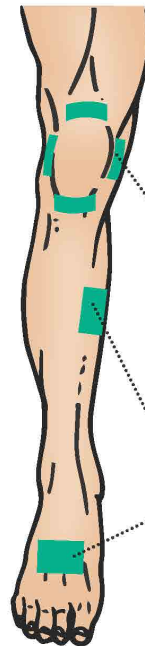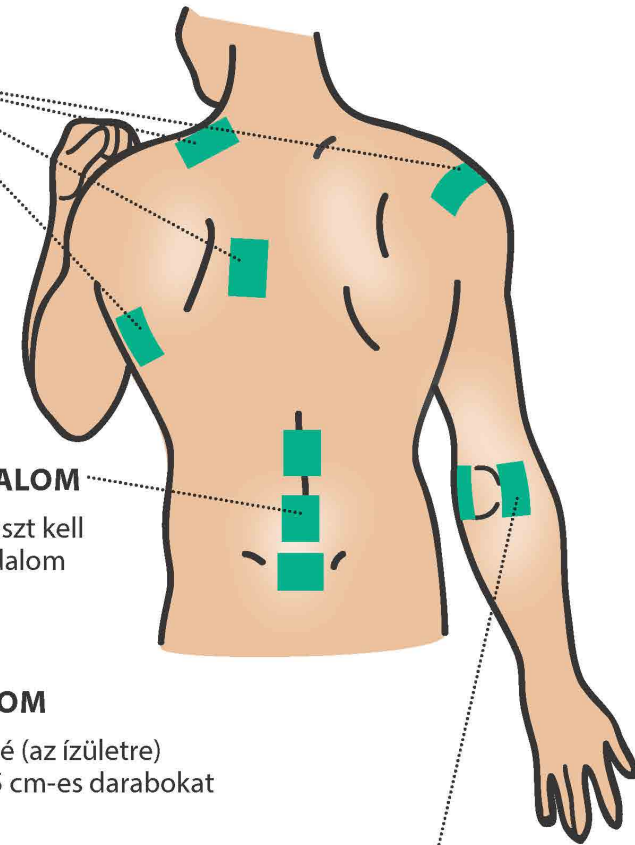

MOTTO[®]

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ
sportolóknak