

Il cerotto Motto è utile per apportare sollievo in caso di **dolori alle articolazioni, dolori muscolari e contratture di vario tipo.**

## CONSIGLI PER L'USO



Tagliare un pezzo da 3-5 cm, togliere la protezione e applicare il cerotto sulla pelle pulita e asciutta della parte dolente. **Il cerotto può essere ritagliato in parti di varie dimensioni**, in modo tale da poter essere utilizzato in zone più o meno ampie.

5x5

Ad esempio, in caso di dolori muscolari, di lumbalgia o più in generale di dolori alla schiena, è consigliato l'uso di ritagli di circa 5x5 cm da applicare sulla zona del dolore. Utilizzare un cerotto di 5x5 cm anche su contratture muscolari causate da posizioni scorrette durante il sonno o praticando sport. Per il sollievo dal dolore in zone più ristrette, come ad esempio lesioni e contusioni, sarà sufficiente ritagliare cerotti da 3x5 cm.

3x5



Per applicare meglio ed attivare al più presto il cerotto, **si suggerisce di riscaldarlo per alcuni secondi con leggera pressione della mano.**

10

Il cerotto **va mantenuto applicato** fino alla scomparsa dei sintomi per un tempo **da 1 a 10 giorni** e, se necessario, si può cambiarlo per continuare l'applicazione.



Il cerotto è **resistente all'acqua** e non ostacola la pulizia del corpo, ma è bene evitare forti sfregamenti.

Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Vedere la scadenza riportata sulla confezione.

## SULL'INVENTORE

### Ottó Mallász

è stato un ingegnere elettrotecnico che si è distinto per aver inventato e brevettato numerosi prodotti nel campo dell'elettrochimica.

All'inizio degli anni ottanta, in virtù della sua profonda conoscenza sull'interazione tra correnti elettriche e corpo umano, Mallász avvia un progetto volto a sviluppare un prodotto del tutto innovativo: un cerotto in grado di apportare sollievo in caso di dolori articolari, muscolari e contratture.

Il principio su cui si basa l'**azione del cerotto** si fonda su una struttura e composizione particolari: a contatto con la pelle genera deboli correnti elettriche continue che rilassano i muscoli, sciolgono le contratture ed attenuano il dolore.

I test di verifica dell'efficacia e della totale assenza di effetti indesiderati del cerotto Motto sono stati effettuati, tramite il Fondo Innovazione dell'Ufficio Centrale Ungherese, in numerose e prestigiose cliniche e università ungheresi (Clinica Ortopedica dell'Università delle Scienze Mediche di Semmelweis, Dipartimento di Neurologia dell'Ospedale San István di Budapest, Clinica di Chirurgia e Clinica Dentale ecc.).


I risultati hanno dimostrato un'eccellente efficacia del cerotto e l'assenza di effetti collaterali nel 100% dei casi.

Ottó Mallász fonda la Motto-Elektro s.r.l., che ancora oggi si occupa della produzione e distribuzione del Cerotto Motto in gran parte dell'Europa.


# MOTTO®

EFFICACE PER  
**10 GIORNI**

# MOTTO®

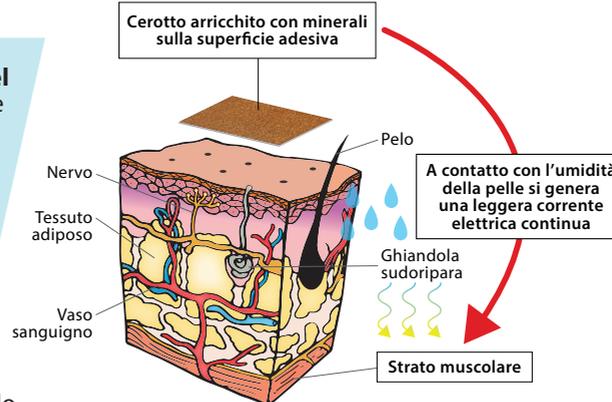

**RILASSAMENTO DEI MUSCOLI,  
SCIOGLIMENTO DELLE CONTRATTURE.  
SCOMPARSA O ATTENUAZIONE DEL DOLORE.**  
Senza effetti collaterali e senza l'impiego di farmaci.

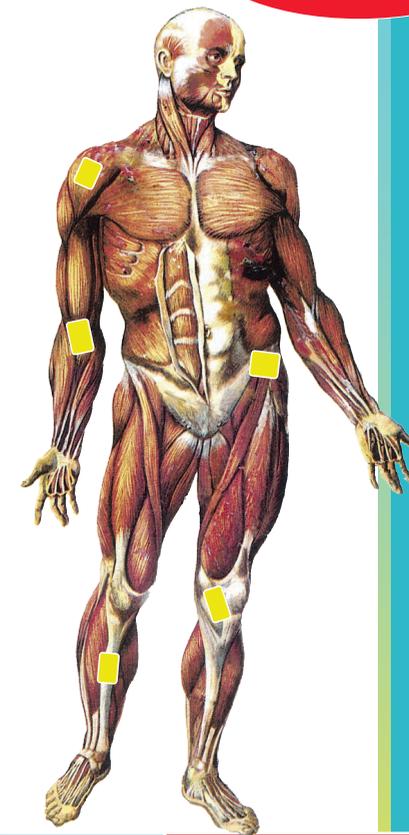


# CEROTTO MOTTO

DISPOSITIVO  
MEDICO  
CLASSE I

EFFICACE **SOLLIEVO**  
**DAL DOLORE**

INVENZIONE PREMIATA CON LA MEDAGLIA D'ORO  
ALL'EXPO MONDIALE DEI BREVETTI DI BRUXELLES.

DISTRIBUITO DA:  
 NovaVis  
Pharma

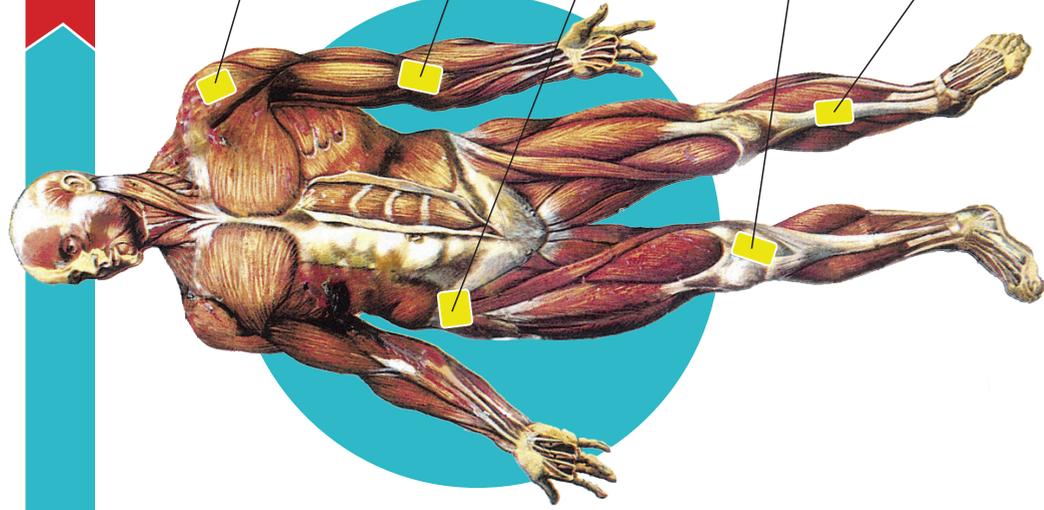

In caso di **dolori delle braccia o delle spalle** applicare cerotti da 5x5 cm sulla zona del dolore e da 3x5 cm tra la spina dorsale e le scapole. Dopo la scomparsa del dolore è consigliato portare il cerotto ancora per qualche giorno.

### Dolori ai gomiti

In caso di **dolore alle articolazioni (coxoartrosi)** applicare cerotti da 5x5 sull'esterno dei glutei.

In caso di **dolori cronici delle ginocchia** è probabile che si debba portare il cerotto continuamente. In caso di contusioni o dolori reumatici, il dolore cessa in 1-10 giorni.

### Dolori a seguito di fratture ossee

#### Mal di collo


In caso di **dolori delle braccia o delle spalle** applicare cerotti da 5x5 cm sulla zona del dolore e da 3x5 cm tra la spina dorsale e le scapole. Dopo la scomparsa del dolore è consigliato portare il cerotto ancora per qualche giorno.

#### Dolori muscolari alle scapole

**Lombalgia o ernia del disco** intervertebrale

In caso di **dolori alle articolazioni delle anche** applicare cerotti da 5x5 sull'esterno dei glutei.

#### Infiammazione della guaina tendinea

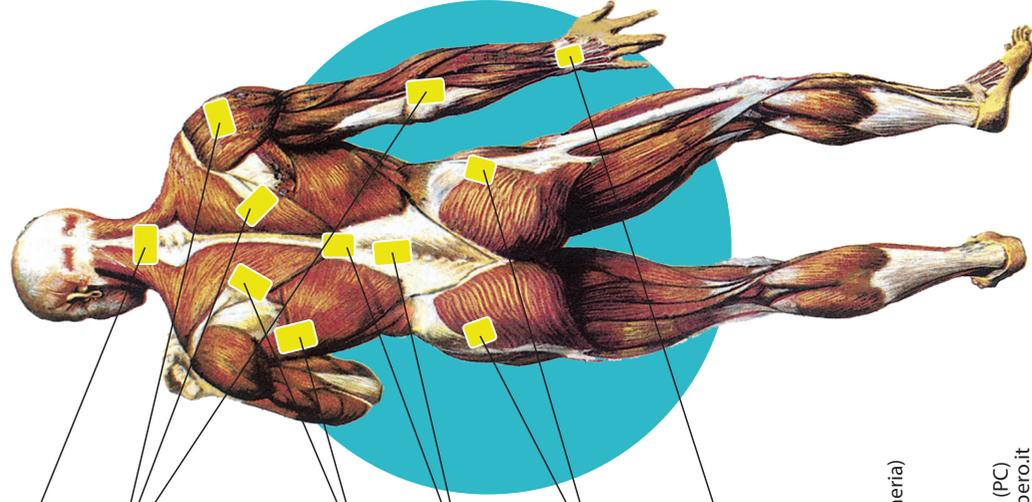

**Prodotto da:**  
Motto-Elektro Kft.  
Törökvezs út 74/B  
1025 Budapest (Ungheria)

**Distribuito da:**  
Novavis Pharma s.r.l.  
Via Repubblica 8  
29010 Villanova sull'A. (PC)  
e: novavispharma@libero.it

**MOTTO®**