
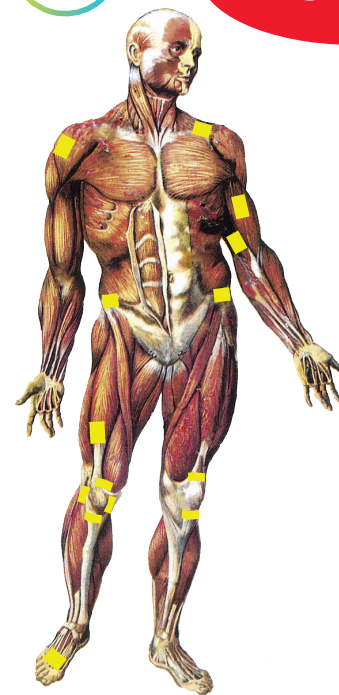


PUNTI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

7
giorni

MOTTO®

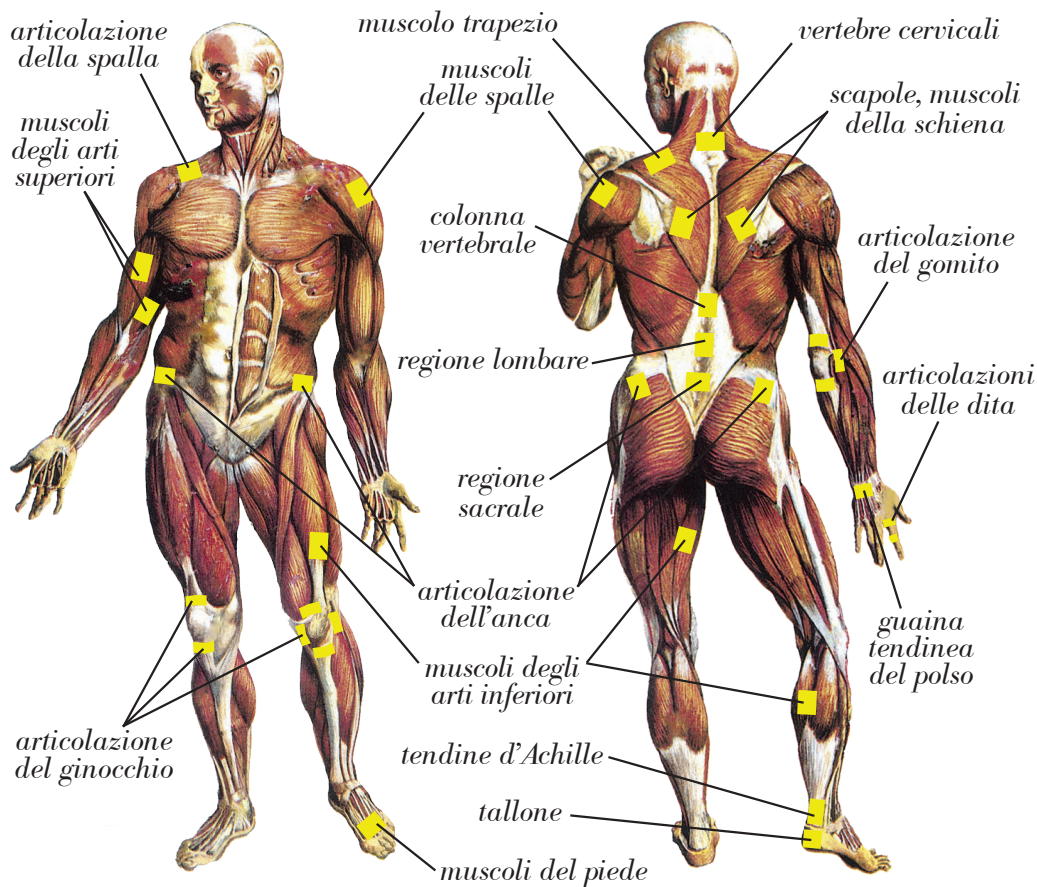

CEROTTO MOTTO

- » dolori articolari
- » dolori muscolari

DOLORI
CRONICI

INVENZIONE PREMIATA CON LA MEDAGLIA D'ORO
ALL'EXPO MONDIALE DEI BREVETTI DI BRUXELLES.

SENZA
MEDICINALI



Applicare il cerotto sempre
nel punto di dolore più acuto.



Eventuali residui di adesivo dopo la rimozione del
cerotto possono essere eliminati con alcool denaturato.

CONSIGLI PER L'USO

Modo di applicazione:

1 Tagliare un pezzo da 3-5 cm e togliere la protezione cartacea. Il cerotto può essere ritagliato in parti di varie dimensioni.

2 Applicare il cerotto sulla cute pulita della parte dolente, asciutta, senza creme e senza presenza eccessiva di peli. Evitare l'applicazione su pelle sottile e vulnerabile. Nel caso di dolore muscolare, individuare il punto più doloroso dove applicare il cerotto (non è necessario coprire l'intera area dolorante con il cerotto).

3 Per applicare meglio ed attivare al più presto il cerotto, si suggerisce di riscaldarlo per alcuni secondi, dopo l'applicazione, con in leggero massaggio o pressione della mano.

DOSAGGIO: Può essere applicato in più punti ed è adatto anche per il trattamento di più tipi di dolore, ma il contenuto di una confezione (2 cerotti 5x15 cm) è la dose massima utilizzabile contemporaneamente. Il cerotto deve essere sostituito dopo 7 giorni fino a un massimo di 30 giorni di utilizzo continuo, dopodiché è necessaria una pausa di 1 settimana.



Il cerotto è impermeabile ed è possibile utilizzarlo sotto la doccia o durante gli sport acquatici.



Il cerotto è traspirante e permette un utilizzo continuo fino a 7 giorni, dopodiché se il dolore non è scomparso, può essere sostituito.

Prestazioni: a seconda delle condizioni, il sollievo dal dolore è previsto entro poche ore o pochi giorni.

Informazioni sul rischio di riutilizzo di un cerotto usato: da escludere perché inefficace e per il rischio di contaminazione incrociata.

Informazioni sulla mancanza di beneficio clinico del dispositivo e sui rischi associati al suo utilizzo: se non si verifica l'effetto desiderato, contattare il medico. L'applicazione del cerotto non sostituisce la diagnosi e il trattamento specialistico.

Rischi residui, controindicazioni, effetti collaterali indesiderati: non sono noti effetti collaterali o rischi dell'utilizzo del cerotto oltre alla reazione allergica all'adesivo indicata in etichetta.

Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente ad altri prodotti per uso topico!

Risonanza magnetica per immagini (**MRI**) o altra risonanza magnetica: il cerotto deve essere rimosso prima della terapia! Dopo il test, si può procedere con una nuova applicazione.

Per i pazienti che utilizzano un **pacemaker:** non dovrebbe influire sul funzionamento del pacemaker, ma non sono disponibili informazioni sufficienti.

È necessario consultare un operatore sanitario nei seguenti casi: reazione allergica (arrossamento e prurito) o altri effetti collaterali. Successivamente contattare il distributore:
Novavis Pharma: Tel.: +393356244536
E-mail: novavispharma@libero.it