



VÍZÁLLÓ TAPASZOK

MOTTO FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ

Gyógyszermentes fájdalomcsillapító tapasz. A tapasz felületére felvitt ásványi anyag és a nedvesség (veríték) kismértékű feszültségváltozást generál. Ez hatással van a bőr alatti szövetekre, elősegíti az izmok ellazulását és a fájdalom enyhítését.

Akut ízületi, izom- és a gerincfájdalmak kiegészítő kezelésére ajánlott.

Figyelmeztetések: Külső használatra! Egyszer használatos! Nyílt sebre nem alkalmazható! Nem steril. Használat előtt olvassa el a belső oldalon található tájékoztatót! A ragasztóanyag tartalmaz **kaucsukot (LATEX)** és **kolófóniumot** ami az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Gyermek, várandós, szoptató anyák esetében nem áll rendelkezésre elegendő információ.

Tárolás: Legfeljebb 30°C-on, száraz, hűvös helyen. A tasakcsomagolás felnyitása után 6 hónapig használható fel.

Összetétel: Kaucsuk ragasztóanyaggal ellátott tapasz, felületén réz tartalmú ásványi anyag granulátummal.

LOT K/2506

Felhasználható: 2030.06.18.

Gyártja:
MOTTO-ELEKTRO KFT.
1025 Budapest
Törökvész út 74/B
e-mail: motto@motto.hu
web: motto.hu

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ
ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ (I.)



(01) 05999881214826
(17) 300618
(10) K/2506

MOTTO®

1982 óta a piacon.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ

Alkalmazás módja: A tapaszból ollóval vágjunk le egy 3-5 cm hosszú darabot, távolítsuk el róla a védőpapírt, és a fájdalom helyére, tiszta, száraz, krémtől, szőrtől mentes, ép bőrre ragasszuk fel! Kerüljük a vékony, sérülékeny bőrön való alkalmazást! Nagyobb fájó izom esetén tapintsuk ki a legfájdalmasabb pontot és oda ragasszunk (nem szükséges a teljes fájó területet lefedni a tapasszal)!

Teljesítőképesség: Állapottól függően, pár órától néhány napon belül várható a fájdalom enyhülése.

Tájékoztató az eszköz újrafelhasználásának kockázatáról: Hatástalanság és keresztfertőzés veszélye miatt nem ajánlott.

Tájékoztatás az eszköz klinikai előnyeinek hiányáról, használatával járó kockázatokról: Amennyiben nem tapasztalja a kívánt hatást, forduljon kezelőorvosához! Az alkalmazás nem helyettesíti a szakorvosi diagnózist és kezelést.

Fennmaradó kockázatok, ellenjavallatok, nemkívánatos mellékhatások: A címkén feltüntetett, a ragasztóanyagra kialakuló allergiás reakción kívül nincs egyéb, ismert mellékhatása, illetve kockázata az eszköz használatának. Ne használja az eszközt egyidejűleg más, helyi alkalmazású készítménnyel!

Mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) vagy más mágneses mechanizmuson alapuló vizsgálat, terápia előtt a tapaszt el kell távolítani! A vizsgálat után helyezzen fel egy új tapaszt.


Pacemaker-t használó beteg esetében: elvi működése alapján nem befolyásolhatja a pacemakert, de nem áll rendelkezésre elegendő információ.

Egészségügyi szakemberrel szükséges konzultálni a következő esetben: Allergiás reakció (bőrpír, viszketés) esetén, vagy bármely más mellékhatás bejelentése: E-mail: motto@motto.hu; Tel.: +36 1 2750106

2db
5 × 15 cm

MOTTO®

díjazott
MAGYAR
TALÁLMÁNY

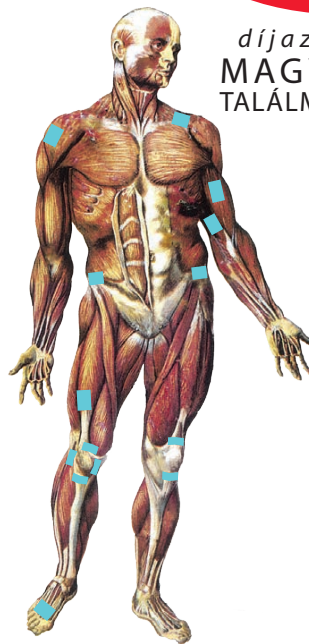

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ
TAPASZ

AKUT
fájdalmakra

- » izomfájdalmak
- » ízületi bántalmak
- » gerincfájdalom



GYÓGYSZERMENTES
doppingmentes



7 NAP HASZNÁLAT



MÉRETRE VÁGHATÓ
tapaszok

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1 A csomagban található tapaszok kisebb darabokra vághatóak. Ollóval vágjon le egy 3-5 cm hosszú darabot, majd távolítsa el róla a védőpapírt!

2 A **fájdalom helyére**, tiszta, száraz, krémtől, szőrtől mentes bőrre ragassza fel a levágott tapaszt. Nagyobb fájó izom esetén tapintsuk ki a legfájdalmasabb pontot és oda ragasszon (nem szükséges a teljes fájó területet lefedni a tapasszal)!

3 Rászorított **kezével melegítse fel** pár másodpercig a felragasztott tapaszt, hogy jól felragadjon és a működés hamar beinduljon.

 **Mindig a tapinthatóan legerősebb fájdalom helyére tapasszunk!**



A légáteresztő alapanyagú tapasszal **7 napos folyamatos használat** lehetséges, ha a fájdalom nem szűnik, csak enyhül, cseréljük!



Vízálló, lehet vele tisztálkodni, vizes sportokhoz használni, de erős dörzsölését kerüljük.

DÓZIS: Egyidejűleg **több helyen is viselhető**, többféle fájdalom egyidejű kezelésére is alkalmas, de egyszerre legfeljebb egy csomag tartalma (2 db 5×15 cm-es tapasz) használható. 7 naponta cserélendő. Összesen 30 napos folyamatos használat lehetséges, utána 1 hetes szünet beiktatása szükséges.



A tapasz eltávolítása után a maradék ragasztóanyagot alkohollal vagy acetonnal távolíthatjuk el a bőrről.

Motto tapasz terméktípusok:

- **Motto reumatapasz:** krónikus fájdalmakra ajánlott. Lassú hatás elérésére lett kifejlesztve, hosszabb távú kezelési célra.
- **Motto fájdalomcsillapító tapasz:** Gyors hatás elérésére lett kifejlesztve, rövid és/vagy hosszú távú kezelési céllal.

A termék biztonságosságát és hatásosságát – többek között – klinikai és biológiai értékelés, valamint több mint 40 év tapasztalata támasztja alá.

■ AJÁNLOTT RAGASZTÁSI PONTOK ■

